

		Klinikknivå			Prosedyre
Instrumenthåndtering					Side 1 av 1
Dokumentplassering: II.SOK.KKK.GPK.2-9		Godkjent dato: 18.01.2023	Revideres innen: 18.01.2025	Sist endret: 18.01.2023	Revisjon: 0.02

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Kvinneklubben SSK/Kvinneklubben poliklinikk SSK/Pasienter og brukere
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

HENSIKT

Bevare og ha klargjøre instrumenter til enhver tid

MÅLGRUPPE

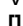
sykepleiere

FREM GANGSMÅTE

- Alle instrumenter som tilhører oss skal være merket gyn.pol direkte i metallet. NB !
 Dette må preges inn på alle nye instrumenter
- Alle instrumenter (flergangs) som brukes ved poliklinikken skal rengjøres og desinfiseres før det leveres sterilsentral for autoklaving. NB albotyl setter stygge merker og må tørkes av før det bløtlegges og evt rester skrubbes bort fra instrumentene etter autoklaving .
- Brukte instrumenter legges i bønne med kaldt vann på undersøkelsesrommet tilsatt 3E-Z yme for å løse opp biologisk materiale(viktig å unngå at blod/sekret etc. tørker inn)
- Sykehusets retningslinjer finner du på EKWeb, under smittevern/I.1.9.1.1 Basale smittevernrutiner sammendrag/I.1.9.1.7 Desinfeksjon av instrumenter og utstyr
- Instrumentvaskemaskinen må kjøres ved behov, pass på at det ikke blir for fullt i maskinen. Husk å åpne instrumentene.
- Siste vask for dagen bør settes på ca. klokka 1400.
 Dette for å rekke å tømme maskinen samt levere til sterilsentral på slutten av dagen (vaskeprogrammet tar ca. 1 time)
- Umerkede instrumenter er sterilsentralen sine sirkulasjonsinstrumenter, disse skal bare returneres etter bruk
- Instrumenter som ikke tilhører oss returneres også sterilsentralen.
- Transportboksene og bord som trilles opp til sterilsentral, sprites daglig
- Ferdig autoklaverte instrumenter hentes utenfor sterilsentral om morgenen

Kryssreferanser

Eksterne referanser

Utarbeidet av: Torill Halvorsen	Fagansvarlig: Inger Klouman	Verifisert av: 	Godkjent av: Ikke styrt	Dok.nr: D47764
---	---------------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------