

 SØRLANDET SYKEHUS		Somatikk Kristiansand		Retningslinje
Rengjøring av ergoterapiutstyr/-lokaler ved ESR, AFR				Side 1 av 2
Dokument ID: II.SOK.AFR.1.3-4		Godkjent dato: 17.02.2025	Gyldig til: 17.02.2027	Revisjon: 2.00

Somatikk Kristiansand/Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering/Organisasjon, ledelse og administrasjon/Hygiene og smittevern

Hensikt

Sikre god hygiene og hindre smitteoverføring mellom pasient, helsepersonell, utstyr osv.

Gjelder for

Ergoterapeutene ved Enhet for Spesialisert rehabilitering og annet helsepersonell som bruker rommene på ergoterapien og utstyret i tilknytning til ergoterapien.

Handling

Se tabell neste side.

Tabellen skal skrives ut og henge på et egnet og synlig sted i det aktuelle lokalet.

Utarbeidet av: Charine Svendsen Eide	Fagansvarlig: 	Godkjent av: Anne Kari Thomassen	
--	--	--	--

 SØRLANDET SYKEHUS	Rengjøring av ergoterapiutstyr/-lokaler ved ESR, AFR				Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOK.AFR.1.3-4	Utarbeidet av: Charine Svendsen Eide	Fagansvarlig: 	Godkjent dato: 17.02.2025	Godkjent av: Anne Kari Thomassen	Revisjon: 2.00

Somatikk Kristiansand/Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering/Organisasjon, ledelse og administrasjon/Hygiene og smittevern

Viktig!

Husk god håndhygiene. Pasientene skal sprite hendene inn til og ut fra rommene.

Type utstyr	Rengjøringsmiddel	Når/hvordan
Behandlingsbenk/pute	WipeClean/ IncidinDuo (Virkon ved søl*)	Etter bruk
Kjøkkenutstyr elektrisk	WipeClean/ IncidinDuo	Etter bruk
Kjøkkenredskaper	Oppvaskmaskin	Etter bruk
Stoler	WipeClean/ IncidinDuo	Etter bruk
Ståbord	WipeClean/ IncidinDuo	Etter bruk
Bord, benk, skap	WipeClean/ IncidinDuo	Etter bruk
Håndtreningsbord	WipeClean/ IncidinDuo	Etter bruk
Verktøy	WipeClean/ IncidinDuo	Etter bruk
Diverse utstyr (baller, ringer osv.)	Ett av følgende alternativer: 1. Instrumentvaskemaskin 2. WipeClean/ IncidinDuo 3. Virkon	Etter bruk
Sitteputer	WipeClean/ IndicinDuo ved utprøving. Egne prosedyrer for rengjøring etter bruk.	Etter utprøving Etter bruk
Rullestoler	WipeClean/ IndicinDuo ved utprøving. Egne prosedyrer for rengjøring etter bruk.	Etter utprøving Etter bruk
Småhjelpemidler	WipeClean/ IndicinDuo	Etter ferdig utlån/utprøving
Tastatur	Antibac - overflatebehandling	En gang i uken

* Ved søl utføres flekkdesinfeksjon som beskrevet i:

[Desinfeksjon/ smittevask ved opphør av isolering og flekkdesinfeksjon](#)