

 Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service		Brukerveiledning	
Redigere eller legge til pasientinformasjon på Discovery XR656 GE - A3		Side 1 av 3	
Dokumentplassering: II.DKS.Rad SSA.1.4.2.1.8-7	Godkjent dato: 20.01.2025	Gyldig til: 20.01.2027	Dato endret: 20.01.2025
			Revisjon: 1.03

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Radiologisk avdeling SSA/Administrasjon og ledelse/Opplæring/Kompetanse/Opplæring

DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Eventuelt hvor godkjent papirversjon finnes.


ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 20.01.2027

OMFANG

Gjelder på A3 - Discovery XR656 for radiografer. Gjelder hvis radiografen må endre ID f. eks ved unormal ID (stjernepasienter).

UTFØRELSE

1. Ha pasient arbeidsliste åpen
Se kap. 5 Hurtigtrinn i bruksanvisningen.

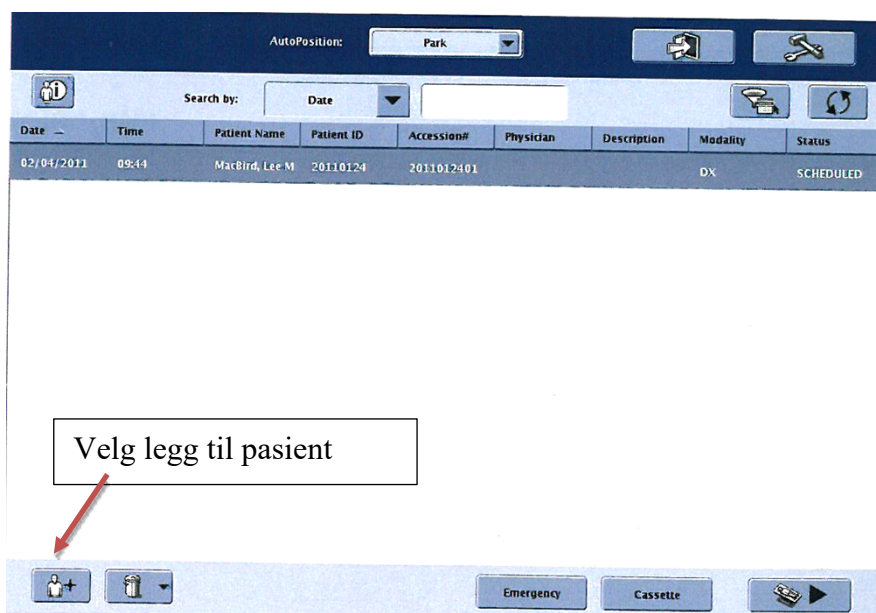

DokumentID:D51104


Utarbeidet av: Vigdis Rasmussen	Fagansvarlig: Veronica Louise Antonsen	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	Verifisert av: []
---	--	---	-----------------------------

 SØRLANDET SYKEHUS	Redigere eller legg til pasientinformasjon på Discovery XR656 GE - A3				Side: 2 Av: 3
Dokumentplassering: II.DKS.Rad SSA.1.4.2.1.8-7	Utarbeidet av: Vigdis Rasmussen	Fagansvarlig: Veronica Louise Antonsen	Godkjent dato: 20.01.2025	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	Revisjon: 1.03


Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Radiologisk avdeling SSA/Administrasjon og ledelse/Opplæring/Kompetanse/Opplæring

2. Nytt skjermbilde kommer opp, Add Patient

Skriv inn navn og pasient-ID, riktig ID (uten stjerne). Skriv også inn NRARnr. Bildene vil da komme over i PACS på riktig måte. Trykk Start Exam.

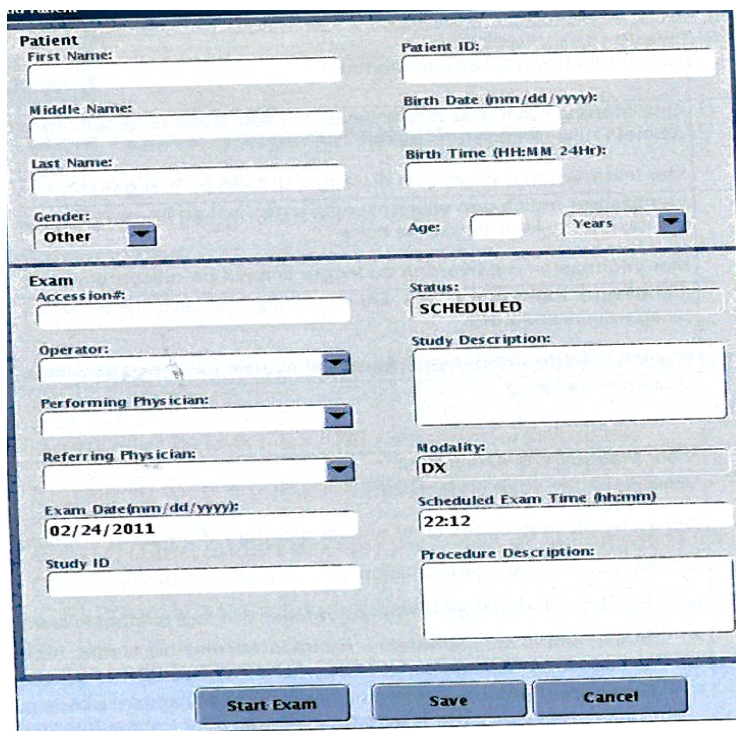

3. Nytt skjermbilde, Select Protocols
Velg ønsket undersøkelse og aksepter.

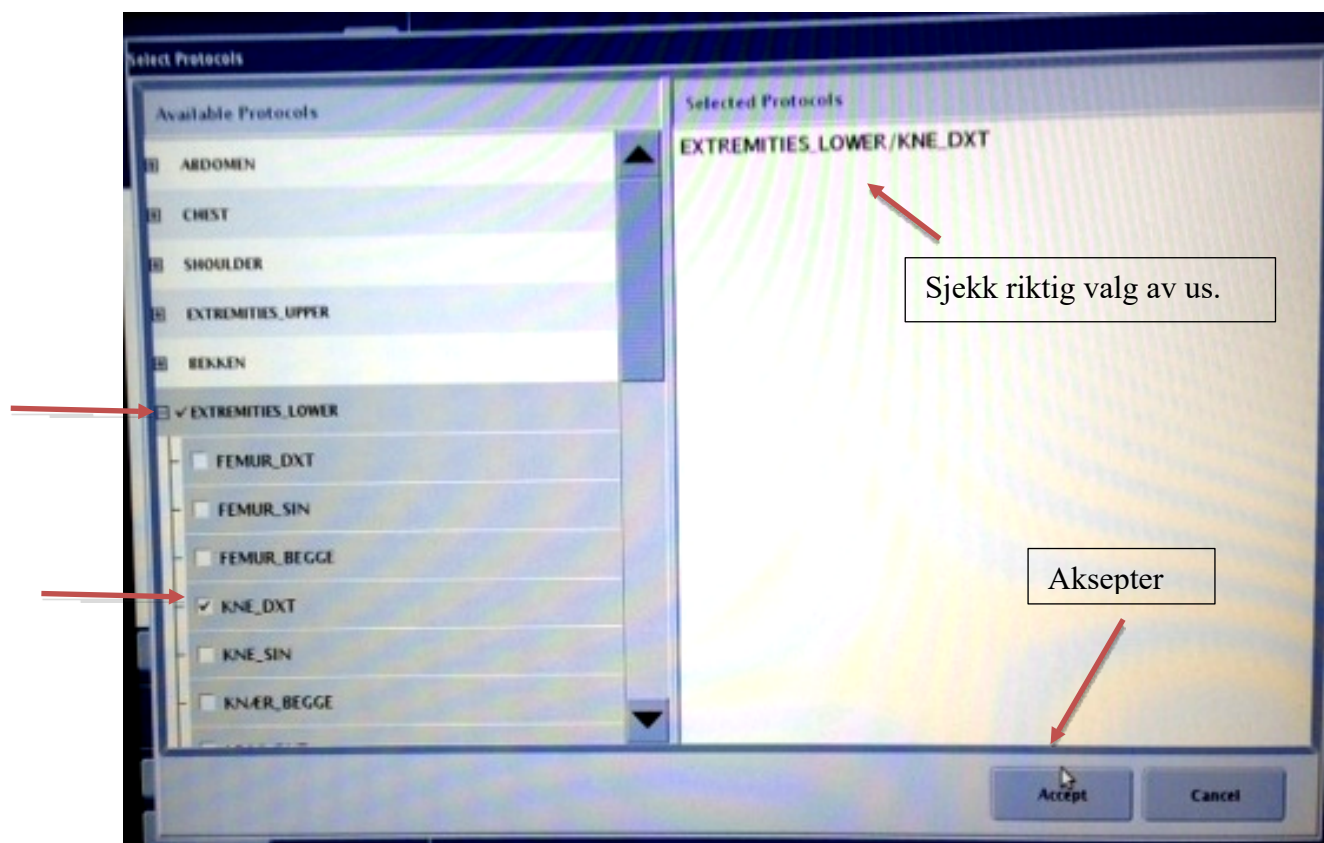

Vedlegg:

 SØRLANDET SYKEHUS	Redigere eller legge til pasientinformasjon på Discovery XR656 GE - A3				Side: 3 Av: 3
Dokumentplassering: II.DKS.Rad SSA.1.4.2.1.8-7	Utarbeidet av: Vigdis Rasmussen	Fagansvarlig: Veronica Louise Antonsen	Godkjent dato: 20.01.2025	Godkjent av: Avd. leder Inger Wenche Nilsen	Revisjon: 1.03

Klinikk for medisinsk diagnostikk og klinisk service/Radiologisk avdeling SSA/Administrasjon og ledelse/Opplæring/Kompetanse/Opplæring

Kryssreferanser:

Eksterne referanser:

Link: [Brukermanual Discovery XR656 norsk versjon i Merida-web](#)