

HAMILTON C6 - KONTROLLSKJEMA FOR KLARGJØRING

Side 1 av 1

 Dokument ID:
II.SOA.AIO.SSA.2.c-39

 Gruppe:
Utstyr, arbeidsrutiner

 Godkjent dato:
21.04.2026

 Gyldig til:
21.04.2028

 Revisjon:
1.09

Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/INTENSIV/Pasienter og brukere/Utstyr, arbeidsrutiner

Hukk av når utført:


	Kast brukt slangesett
	Ta ut ekspirasjonsventil (flergangs) - Tas fra hverandre i to deler og vaskes i maskin
	Legg T-stykke (til inhalasjon) til vask (om aktuelt)
	Vask over hele maskinen og rydd i kabler/ledninger - O2-kabel - Strømledning - Ledning til inhalasjon (aerogen) - CO2-ledning
	Bruk ny/ren ekspirasjonsventil
	Sett på filter på inspirasjon og ekspirasjon
	Monter nytt slangesett med fukter
	Sett på flowsensor
	Utfør preop kontroll - Tetthet - Flowsensor
	Sjekk at det lyser grønt i begge lamper på fuktekammer
	Legg ved svivel og sterilt vann til fukting
	Sett maskinen til strøm
	Heng denne lappen på maskinen

Dato og signatur:

Ved oppkobling av barneslanger:

- Legg ved barnesvivel
- Koble fra og kast «ekstradelen» på den blå siden på barnesettet
- Ikke kast den lille posen med ekstradeler

Kryssreferanser
Eksterne referanser

Utarbeidet av: H. Hembre	Først utgitt: 18.06.2020	Fagansvarlig: 	Godkjent av: Berit Vrålstad	
------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--