

HAMILTON C6 - KONTROLLSKJEMA FOR KLARGJØRING

Side 1 av 1

Dokument ID:
II.SOA.AIO.SSA.2.c-39Gruppe:
Utstyr, arbeidsrutinerGodkjent dato:
20.03.2024Gyldig til:
20.03.2026Revisjon:
1.08

Somatikk Arendal\Anestesi, intensiv, operasjon\INTENSIV\Pasienter og brukere\Utstyr, arbeidsrutiner

Hukk av når utført:

	Kast brukt slangesett
	Ta ut ekspirasjonsventil (flergangs) - Tas fra hverandre i to deler og vaskes i maskin
	Legg T-stykke (til inhalasjon) til vask (om aktuelt)
	Vask over hele maskinen og rydd i kabler/ledninger - O2-kabel - Strømledning - Ledning til inhalasjon (aerogen) - CO2-ledning
	Bruk ny/ren ekspirasjonsventil
	Sett på filter på inspirasjon og ekspirasjon
	Monter nytt slangesett med fukter
	Sett på flowsensor
	Utfør preop kontroll - Tetthet - Flowsensor
	Sjekk at det lyser grønt i begge lamper på fuktekammer
	Legg ved svivel og sterilt vann til fukting
	Sett maskinen til strøm
	Heng denne lappen på maskinen

Dato og signatur:

Ved oppkobling av barneslanger:

- Legg ved barnesvivel
- Koble fra og kast «ekstradelen» på den blå siden på barnesettet
- Ikke kast den lille posen med ekstradeler

Kryssreferanser

Eksterne referanser

Utarbeidet av:
H. HembreFørst utgitt:
18.06.2020

Fagansvarlig:

Godkjent av:
Berit Vrålstad