

## HAMILTON C6 - Kontrollskjema for klargjøring, 1CC, SSA

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

II.SOA.APP.SENG.2.MSPL.2.2-4

Godkjent dato:

01.04.2025

Revideres innen:

01.04.2027

Sist endret:

01.04.2025

Revisjon:

2.05

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Avdeling pleie og poliklinikk/Sengeposter/Pasienter og brukere

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

<b>Etter maskinen har vært i bruk: (Hukk av når utført)</b>	
Kast brukt slangesett	
Ta ut ekspirasjonsventil <ul style="list-style-type: none"> <li>- Engangs) kastes etter bruk</li> </ul>	
Vask over maskinen <ul style="list-style-type: none"> <li>- O2-kabel – henges ryddig på maskinen</li> <li>- Strømledning</li> <li>- Ledning til inhalasjon (aerogen) – henges ryddig på maskinen</li> </ul>	
Sett i ny/ren ekspirasjonsventil – pass på at den kommer ordentlig i hakk	
Monter nytt slangesett og flowsensor (Ikke kast kne eller kalibreringsadapter)	
Sett på filter på inspirasjon (rundt filter) - og ekspirasjonsventil (Firkantet Hepafilter)	
Monter på forstøversett. Består av tre deler: Kne, forstøverkammer og Y-stykke	
Utfør preop kontroll (Velg preop kontroll på maskinen. Du skal kun teste: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tetthet</li> <li>- Flowsensor</li> </ul>	
Kontroller at maskinen er innstilt på NIV	
Skru av maskinen	
Koble maskinen til strøm i vegg inne på bipap rom	
Heng denne sjekklisten på maskinen	
<b>Før maskinen tas i bruk:</b>	
- Koble til sterilt vann til forstøver	
- Kontroller at maskinen er innstilt på NIV	
- Velg <b>ALLTID</b> «voksen/pedi.»	
- Fyll <b>ALLTID</b> inn høyde og kjønn (maskinen regner ut idealvekt)	

Dato og dobbeltsignatur:

### Kryssreferanser

### Eksterne referanser

Utarbeidet av: AIO/Angela Martinez- Pettersen/Tonje Altenborg	Fagansvarlig: Thomas Dahlslett	Verifisert av: []	Godkjent av: Nina Roland	Dok.nr: D51223
---	-----------------------------------	----------------------	-----------------------------	-------------------