


Kortfattet bruksanvisning Harmonic Ultracision

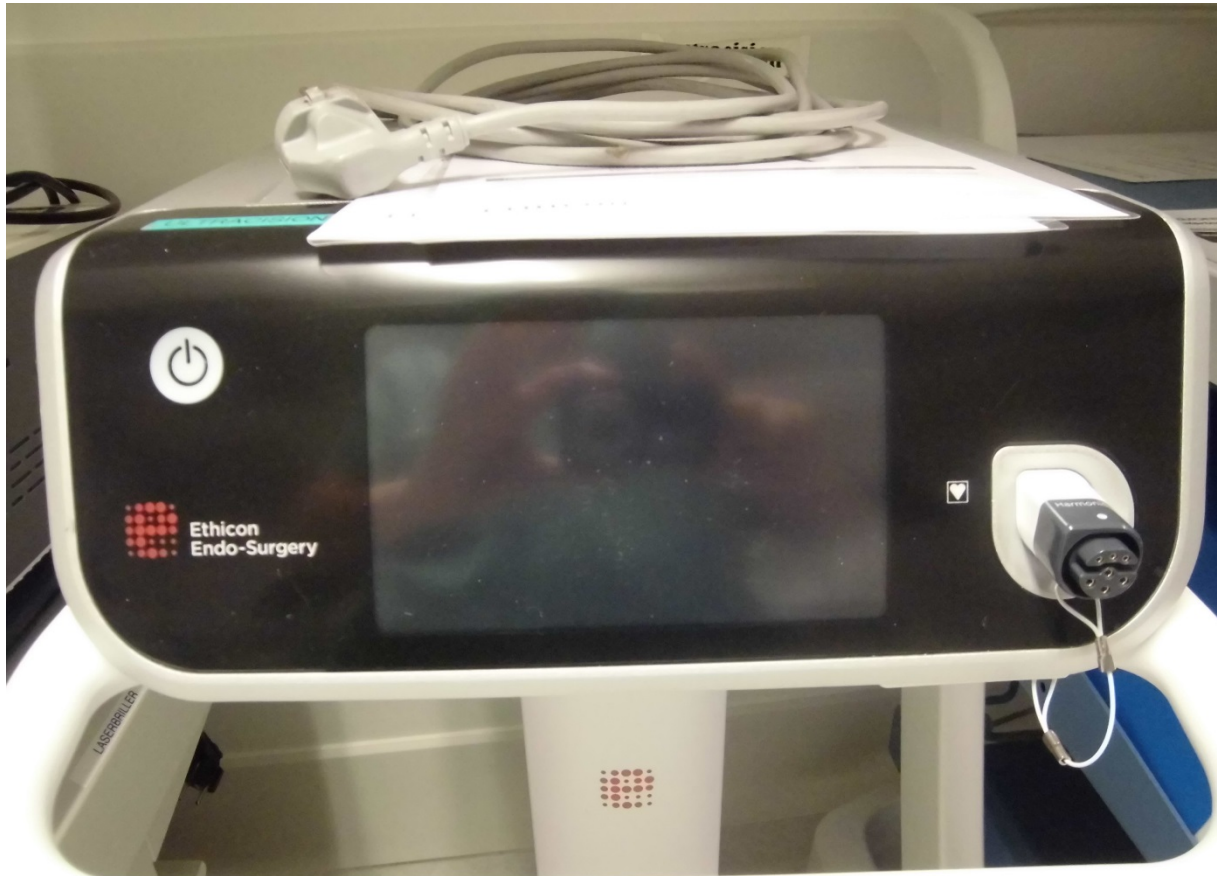

HARMONIC FOCUS®+ saks
Monteringsguide

Montering

Ved bruk av steril teknikk, fjern instrumentet fra emballasjen

Hold i håndstykket og fest instrumentet ved å rotere med klokken på håndstykket

OK

X

Bruk momentnøkkel til å stramme instrumentet på håndstykket. Skru momentnøkkel med klokken, hold kun i håndstykket. Klikker to ganger.*

Fjern momentnøkkelen fra instrumentet. Ikke kast momentnøkkelen inntil det kirurgiske inngrepet er ferdigstilt.

Forhåndstesting

*Hvis du ikke følger denne monteringsmåten kan utilsiktet skade forårsakes på HARMONIC®-saksen eller flergangs håndstykket.

Koble det monterte håndstykket og instrumentet til generatoren og skru på generatoren. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre. Skjerm bilde for testing vises når oppstartssekvensen er fullført. Aktiver instrumentet (ved å trykke ned en av aktiverings knappene) med åpne kjever i 2 sekunder for å kjøre testen, til HARMONIC®-skjerm bilde vises.

Festing av momentnøkkelen

Lukk klemmearmen og plasser momentnøkkelen over den distale enden av instrumentet

Se bruksanvisningen og generatorens brukermanual for alle produkt detaljer, inkludert en fullstendig liste over advarsler og forhåndsregler.

AD188_NO ver1© 2014 Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH
www.ethicon.com