

VASKEANVISNING FOR FLEXIBELT URS

Vask:

- ✓ Se plansje på veggen over vaskemaskin hvordan scopet skal plasseres i vaskemaskin ETD 3.
- ✓ Krana i 3 deler + en gummimembran demonteres.
- ✓ Vaskes gjennom med cidezyme/vann blanding med den korte grønne børsten, og legges i den lille kurva i ETD 3 vaskemaskinen. *for å åpne til en 20-30 min*
- ✓ Den lange tynne vaskebørsten dyppes i blandingen av cidezyme/vann og føres forsiktig gjennom scopet, som må være **RETTET UT I TUPPEN**, og ut igjen. Gjenta **X3!!!!**
- ✓ Børsten legges så i den lille kurva for vask. Slange for gjennomspyl kobles på scopet hvor krana ellers er plassert.
- ✓ Husk å koble til trykktester(rød eller blå slange).
- ✓ Lukk døra og start maskinen.
- ✓ Hvis det oppstår melding: leak, må medisins teknisk kontaktes (Ahmed,4754).

Plansje vegg:

