

Kortfattet bruksanvisning Covidien Vallylab LS 10 Ligasure apparat

1. Slå på apparatet ved å trykke på PÅ/AV knappen

2. Legg merke til følgende:

*Systemstatusindikator lyser hvitt, roterer mellom hvert segment, indikerer aktivitet ved oppstart og selvtest

*En tone lyder ved fullføring av selvtest og systemindikatoren lyser konstant hvitt.

3. Kople til gyldig LigaSure instrument i instrumentport helt til høyre, hvis instrumentet er koplet riktig vil statusindikator lyse lilla og dette indikerer at systemet er klart til bruk.