


## FORSTØVERBEHANDLING PÅ SLANGESETT (Prismavent og Lumis)

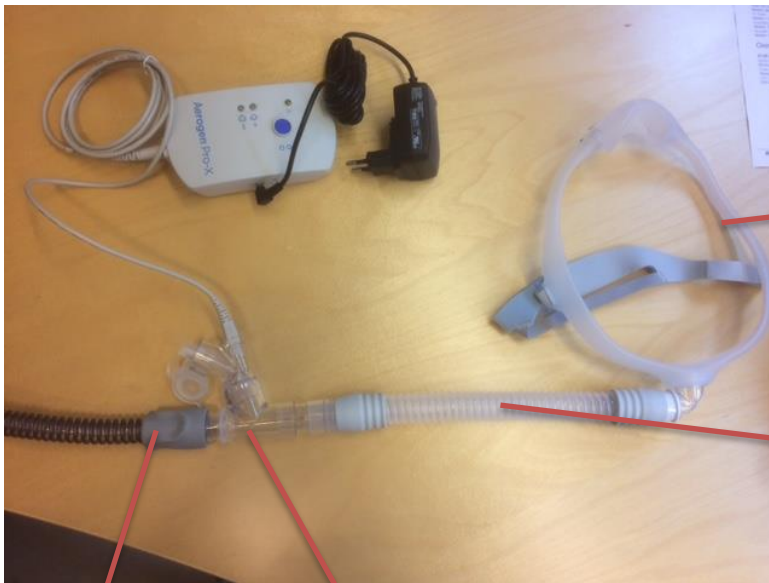

Maske.  
Helmaske eller nesemaske

Mellomstykke. Vaskes sammen med  
T- stykke daglig.

Slange til VPAP/  
Prismavent

T- stykke med forstøverbeger (Solo).  
Etter forstøvning renses begeret med 1 ml NaCl 0,9% mens pasienten er tilkoblet.  
Begeret kastes etter 1 mnd bruk.  
T- stykke og mellomstykke såpevaskes (for eksempel Zalo) daglig.  
Institusjon/ sykehus: Sterilt/ kokt, varmt (ikke kokende) såpevann, skylles og lufttørkes.



Tilkoblingsstykke



Samme oppsett både for  
nesemaske og helmaske.