


Forstøverinhalasjon Aerogen Pr-X Ultralyd- forstøver

- Forstøverbehandling via maske.
- Aerogen Pro- X tilkobles slangekretsen.
- Apparater med kun én slange blåser luft fra maskinen til pasienten, og luft går ikke tilbake til maskinen (S9 VPAP, Lumis VPAP, Stellar og Prismavent)
- Medikamentpartikler/ saltvanns partikler kan potensielt sette seg i maske utluftingsventilene og tette disse. Det kan derfor være nødvendig med egen maske til bruk under forstøving. Masken og utluftingsventilene må da skylles etter hver inhalasjon, og såpevaskes (Zalo-vann eller lignende) daglig.
- Medikamenter vil også sette seg på ansiktet og kunne forårsake fuktproblemer og hudirritasjon. Det er derfor viktig å tørke over ansiktet med en klut vridd opp i varmt/ lunkent vann etter forstøverinhalasjoner på maske.

Deler - forklaring

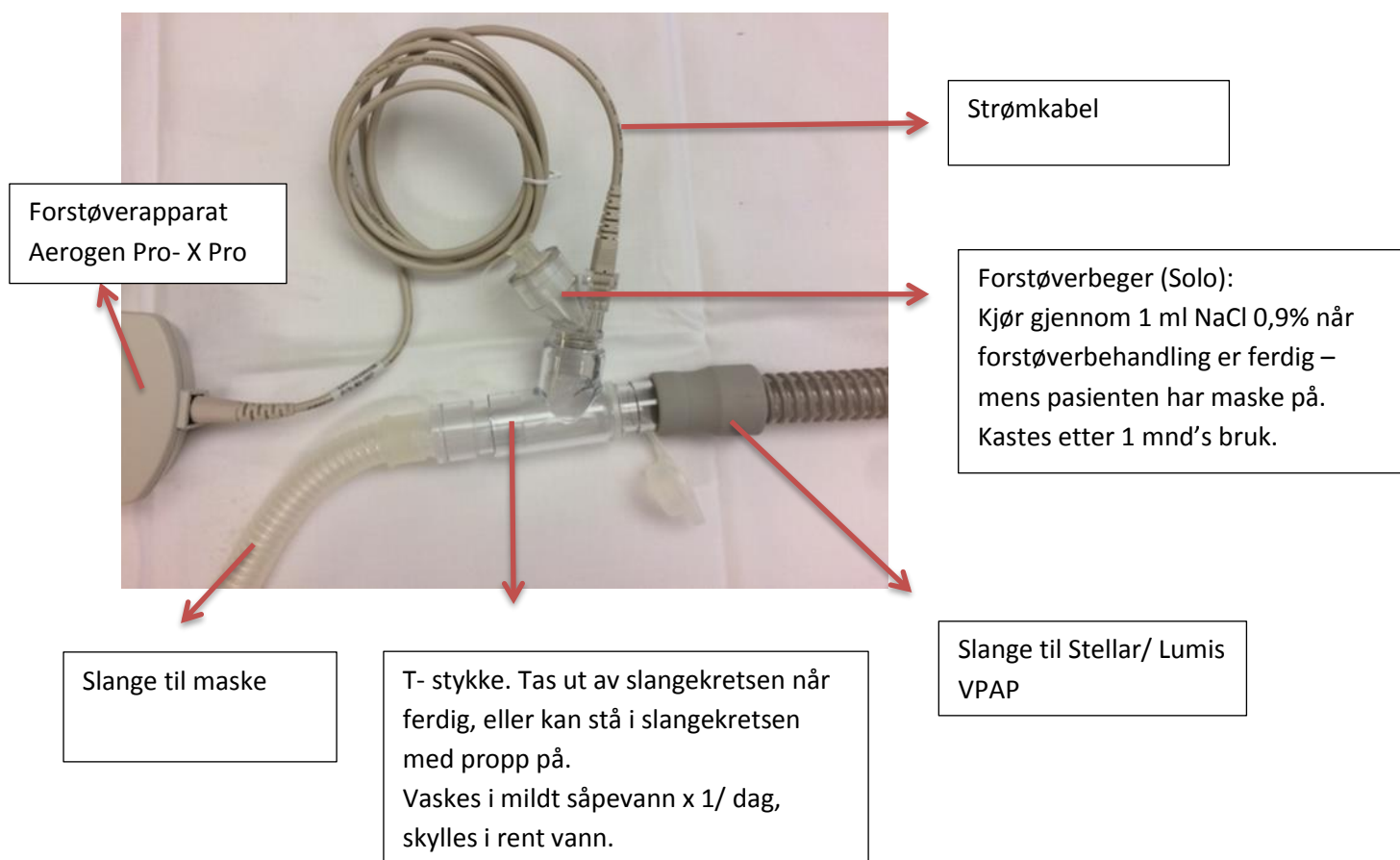

Oppkobling av neseproppmaske:



Oppkobling med helmaske



Forstøvning på Dreamwear nesemaske



Standard forstøveroppkobling, og som vist med eksempel på maske her, og setter inn ètt filter som vist på bildet + ètt filter på maskinen- der hvor den lille hvite slangestussen festes på maskinen.




For å få forstøverinnsatsen bort fra hodet, kan man evt snu forstøverinnsatsen (T-stykke med forstøverbeleg) og sett inn mellomkoblingen i mellom maske og forstøverinnsats.



Alternativ oppkobling med slange-mellomkobling



Komponenter

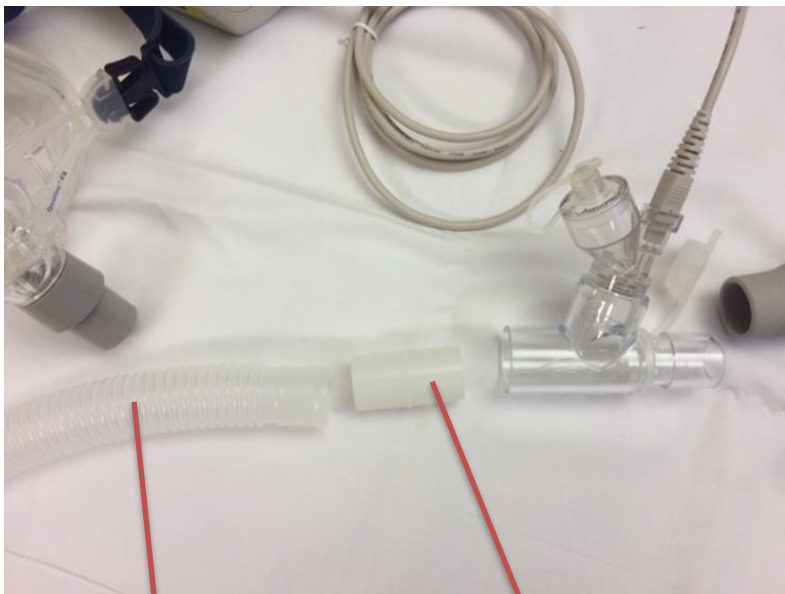

Slange- mellomstykke.
Vaskes i mildt såpevann
daglig, skylles.

Overgang mellom T- stykke og slange-
mellomstykke.
Vaskes i mildt såpevann daglig, skylles.