


PRISMAVENT 40 ventilator

- Kan brukes både med - og uten varme fukter, men kan ikke drifte varme fukter i batteridrift. Uten varme fukter tilkoblet har maskinen et deksel påkoblet, på venstre side på bildet (se bilde under).
- Internbatteri sikrer avbruddsfri behandling ved evt. strømbrudd. Batteri varighet ca 8-12 timer. Internbatteriet lades når maskinen står tilkoblet strømmettet
- Maskinen alarmerer når nettstrøm frakobles. Alle alarmer må bekreftes ved å trykke på «hjulet», ellers kan maskinen plutselig stoppe.

Nye masker, slanger og filter fås ved henvendelse Enhet for Behandlingshjelpemidler, BHM.
Kontakt tekniker ved Enhet for behandlingshjelpemidler første virkedag ved behov for evt. teknisk hjelp.

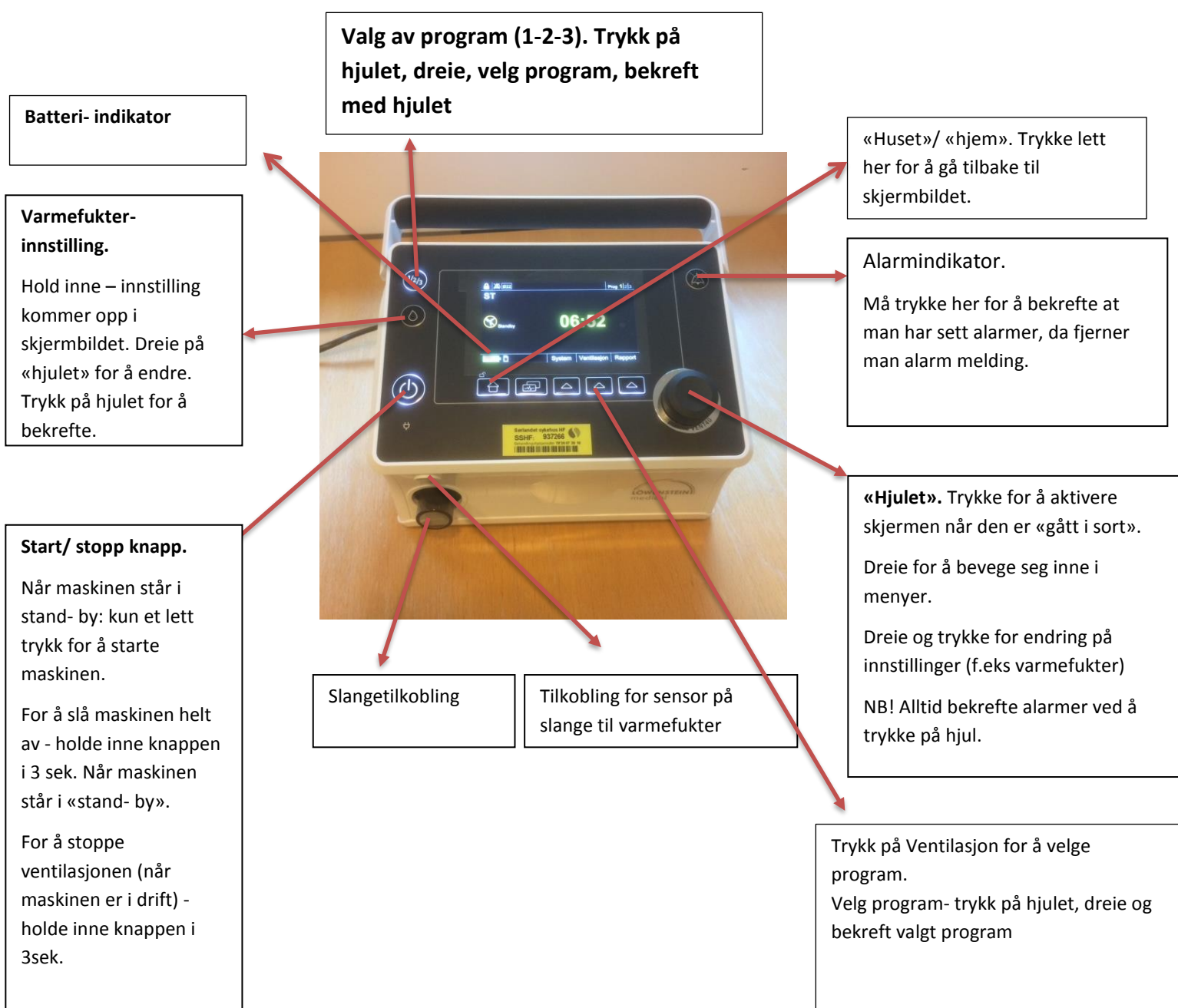

Bakside



Luftinntak- filter.

Vaskes x 1 pr mnd. og skiftes når pas. reiser fra inst./sykehus.

Vaskes i mildt såpevann.

Utløserknapp – for avkobling av deksel og varmfukter.

Varmefukter

Tilkobling nettstrømkabel, med «låseklemme»

Slangeoppkobling ved bruk av deksel (uten varmfukter)



Enkel, 22 mm slange, uten varmesensor. Slangen vaskes x 2 pr uke når i bruk som slange til varmfukter.

Starte behandling



Hvis maskinen er slått helt av (ikke i «stand- by») – trykk èn gang på start/ stopp knappen. Maskinen starter opp og går i stand by i «stand-by».



Start/ stopp knapp

Når maskinen står i «stand-by» startes den ved å trykke lett på start/ stopp kappen.

Før start – påse at masken sitter tett og godt og behagelig på ansiktet. Evt start maskinen i det maske settes på ansiktet, og feste stropper etterpå.

Stoppe behandling



For å stoppe behandlingen/ ventilasjonen:

Trykk og hold inne start/ stopp knappen i 3 sekunder – og maskinen stopper.

Koble til varmfukter



Trykk her for å koble fra deksel eller varmfukter.

Bruke deksel når pasienten skal ha med seg maskinen på rullestol og når maskinen skal gå på batteri.

Maskinen kan ikke varme opp vannet i fukteren når den går på batteri.

Varmefukter tilkoblet når maskinen er i bruk «hjemme».



Her er dekkelet fjernet.



Varmefukter er klar til å settes på maskinen. Før delene sammen til man hører et klikk.




Tilkoblet varmfukter.
 Temperaturregulering: hold inne «dråpen» på venstre side- til du får opp skjermbilde med fukterinnstilling. Når tallet er i hvit boks kan man dreie på «hjulet» og endre innstillingen. Bekrefte ved å trykke på «hjulet».
 Trykk kort på «huset» for å gå ut av menyen og tilbake til skjermbildet.

Tilkobling for slange.
 Hvis bruk av varmfukter, bruk slange med varmesensor. Varmesensor kobles til maskinen her

Slangetilkobling – og tilkobling for varmesensor på slange som skal brukes når pasienten har varmfukter tilkoblet. Slangen vaskes x 2 pr uke i steril/ kokt såpevann, skylles og henges til avrenning.



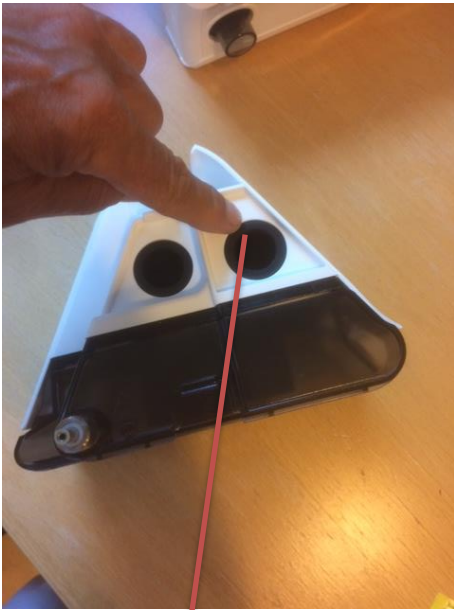

Varmefukter

Hull for etterfylling/ fylling av vann: Inst./sykehus: Sterilt/ kokt vann.
Hjemme: Kommunalt kranvann




Maks fylling 400 ml

Demontere varmfukter



Vippe ut – og deksel på varmfukter løsner

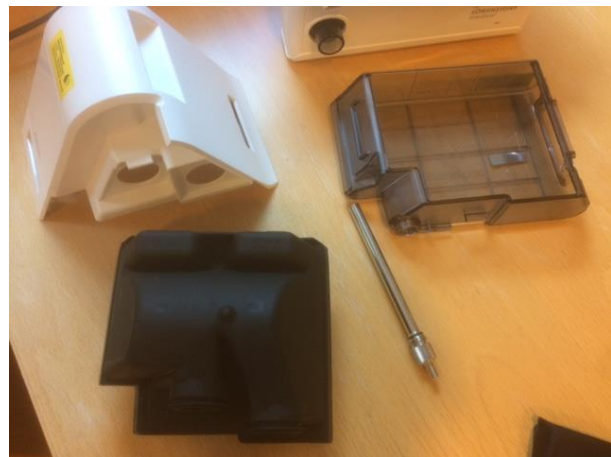

Varmefukterens 4 deler. Demonteres og rengjøres x 2/ uke i inst./ sykehus, x 1/ uke hjemme.

Sterilt/ kokt, varmt (ikke kokende) såpevann (Zalo el. Lignende) i inst. /sykehus.

Vanlig såpevann (Zalo el. lignende) hjemme

Oksygen tilkobling



Egen «nippel» som festes på baksiden – for tilkobling av oksygen.

Denne skal fjernes når oksygen ikke er tilkoblet.

Minnekort

Maskinen lagrer data for behandling og bruk av maskinen på et minnekort. Dette sitter bak gummidekselet som vist på bildet.



Minnekortet skal stå i maskinen, men fungerer som vanlig uten minnekortet også.

Det hender man får beskjed om å sende inn minnebrikken for avlesning. Man trykker da på minnebrikken og den spretter litt ut så man får tak i den. Minnekortet settes tilbake i maskinen når det kommer i retur. Hvis 2 maskiner: Viktig at riktig minnekort kommer tilbake i riktig maskin.