

## Innstillinger på diatermi ESG-150 apparatet - Gastrolab SSK

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

**I.5.10.2-75**

Godkjent dato:

**18.09.2024**

Revideres innen:

**18.09.2026**

Sist endret:

**18.09.2024**

Versjon:

**0.01**

Foretaksnivå/Virksomhetsstyring/Teknologi og innovasjon/MTU - brukerveiledninger

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 18.09.2026 uten endringer i dokumentet.

### POLYPP:

Gul pedal: PulsCut Slow 120W, Effekt 2

Blå pedal: ForcedCoag 30W, Effekt 3

### PulceCut FAST:

Gul pedal: PulseCut Fast 120W, Effekt 2

Blå pedal: ForcedCoag 30W, Effekt 3

### BLØDNING:

Gul pedal: Er slått av

Blå pedal: SoftCoag 40W, Effekt 3 (dette for å «pin-pointe» med slyngen)

### ERCP:

Gul pedal: PulseCut Slow 120W, Effekt 2

Blå pedal: SoftCoag 40W, Effekt 3

### GULLPROBE:

BiSoftCoag 20W, Effekt 1.

Dette er bipolart og apparatet skifter automatisk over til dette ved å velge programmet via «Meny» «Velg» Gullprobe

### Kryssreferanser

### Eksterne referanser

Utarbeidet av: Gastrolab SSK	Fagansvarlig: Gastrolab SSK	Verifisert av: []	Godkjent av: Ikke styrt	Dok.nr: D54623
---------------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------