

Hånddermatom Acculan4- Operasjon- SSA

Dokumentplassering:
II.SOA.AIO.OPA.3.2.7-6

Godkjent dato:
02.10.2024

Revideres innen:
02.10.2026

Sist endret:
02.10.2024


Versjon:
0.03

Klinikknivå/Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/OPERASJON/Støttefunksjoner
ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 02.10.2026

ANTALL	STK.	INSTRUMENTER	CAT. NR.
	1	Hånddermatom Acculan 4	GA340
	1	Lokk	GA678
	1	Batterihylse	GA675
	1	Klaffepinne	
	1	Mutter (gull)	
	10	Klaffer	
INSTRUMENTER	15		

DEMONTERING AV KLAFFER PÅ DERMATOMET

1. Åpne hodet (1) og ta ut knivbladet.
2. Skru av mutteren (2) i gull.
3. Skyv klaffepinnen (18) 4mm til siden og vri på pinnen slik at den kan tas ut.
4. Dra av alle klaffene.

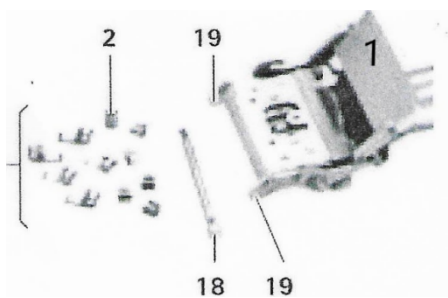

Hånddermatomet vaskes med bryter opp! **Lokket skal være av under vask!**

Lagt av:	Dato	Kontroll før opr. DATO:	Kontroll etter opr. dato:

EKSTRA INSTRUMENTER	EKSTRA INSTRUMENTER

Utarbeidet av: Grethe Espenes Paulsen	Fagansvarlig: Grethe Espenes Paulsen	Verifisert av: []	Godkjent av: Ikke styrt	Dok.nr: D55506
---	--	----------------------	-----------------------------------	--------------------------